



AcuEar C1

Auriculares de escucha asistida
Con reducción de ruido




Guía de usuario interactiva

Versión 2.3.1



Configuración inicial

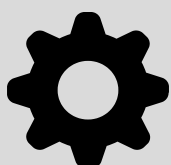

Solución de problemas

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de comenzar
2. Comenzar a usar auriculares
3. Botones y indicadores
4. Energía y carga
5. Resolución de problemas
6. Soporte y comentarios

Siguiente





1. Antes de comenzar

Simple **auriculares de asistencia auditiva**

— no Bluetooth, no es un audífono.

- No se necesita Bluetooth
- No es un audífono médico
- Adecuado para pérdida auditiva leve a moderada
- **Fácil refuerzo del habla** para uso diario
- **Modo de reducción de ruido** para lugares ruidosos
- Hasta **50** horas de uso




Siguiente

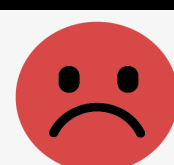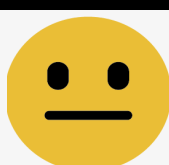

2. Comenzar a usar auriculares

2.1 Uso básico

No es necesario configurar, solo pónelos y enciéndelos (mantén presionado el MFB durante 2s).

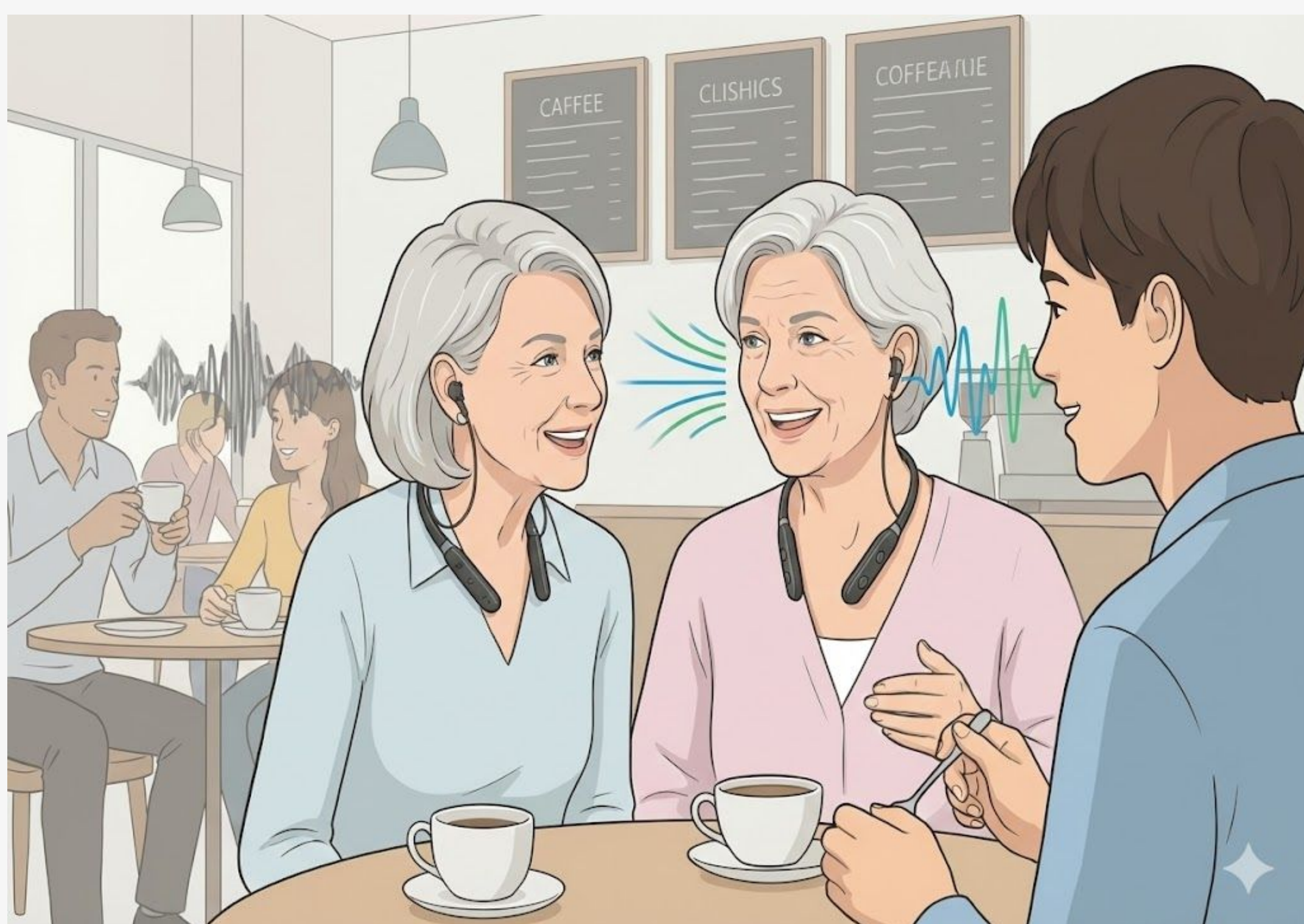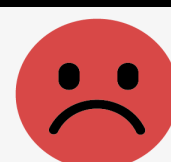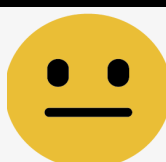[Siguiente](#)

2.2 Ajustar Configuración

- **Modos de escucha (3)**

Presione el botón de modo para cambiar de modo:



- 1 pitido – Normal
- 2 pitidos – Reducción de ruido 1
- 3 pitidos – Reducción de ruido 2

- **Ajustar mejora**

Presione + / – para ajustar el volumen.



Siguiente

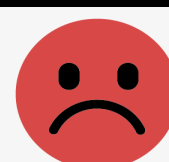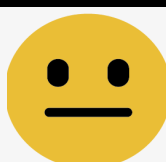

3. Botones & Indicadores



① MFB

Mantener 2s: Encender/apagar



② Botón de modo

Presionar para recorrer:

- Normal
- Reducción de ruido 1
- Reducción de ruido 2

 [Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente

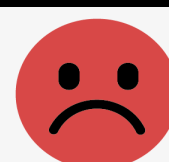
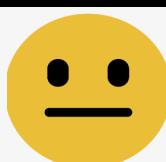


4. Energía y Carga

- Usar un cable USB-C (5V, 0.5A~2A)
- Totalmente cargado: ~ 2.5 hrs
- Tiempo de reproducción: Hasta 50 hrs



Siguiente

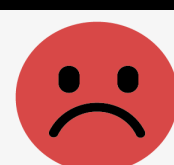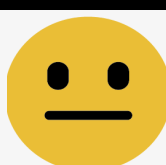

< Atrás




Menú

Califica esta Guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.

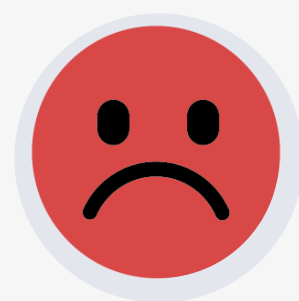

Siguiente



5. Resolución de problemas

Problemas comunes

- Sonidos circundantes demasiado fuertes
- Silbido



👉 Más preguntas frecuentes y ayuda ↗



¿Aún necesitas ayuda?

[Contactar soporte](#) ↗

Siguiente

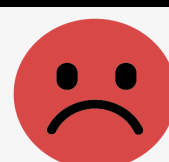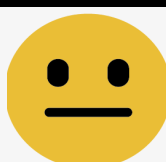



6. Soporte y comentarios

Soporte de agentes

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo
electrónico



Llamar



Chat

Registrar tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

Obtén 24M de garantía

