



AcuEar C1

Écouteurs d'assistance auditive
Avec réduction du bruit




Guide de l'utilisateur interactif

Version 2.3.1



Première configuration

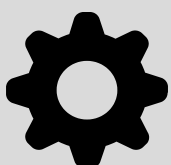

Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Commencer à utiliser les écouteurs
3. Boutons & Indicateurs
4. Alimentation & Charge
5. Dépannage
6. Support & Retour d'information



Suivant

1. Avant de commencer

Simple **écouteurs d'assistance**

— pas Bluetooth, pas un appareil auditif.




- Pas besoin de Bluetooth
- Pas un appareil auditif médical
- Convient pour une perte auditive légère à modérée
- **Amélioration facile de la parole** pour une utilisation quotidienne
- **Mode réduction du bruit** pour les endroits bruyants
- Jusqu'à **50** heures d'utilisation

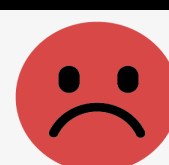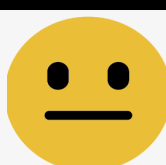[Suivant](#)

2. Commencer à utiliser les écouteurs

2.1 Utilisation de base

Aucune configuration nécessaire, il suffit de le porter et de l'allumer (appuyez et maintenez le MFB pendant 2s).

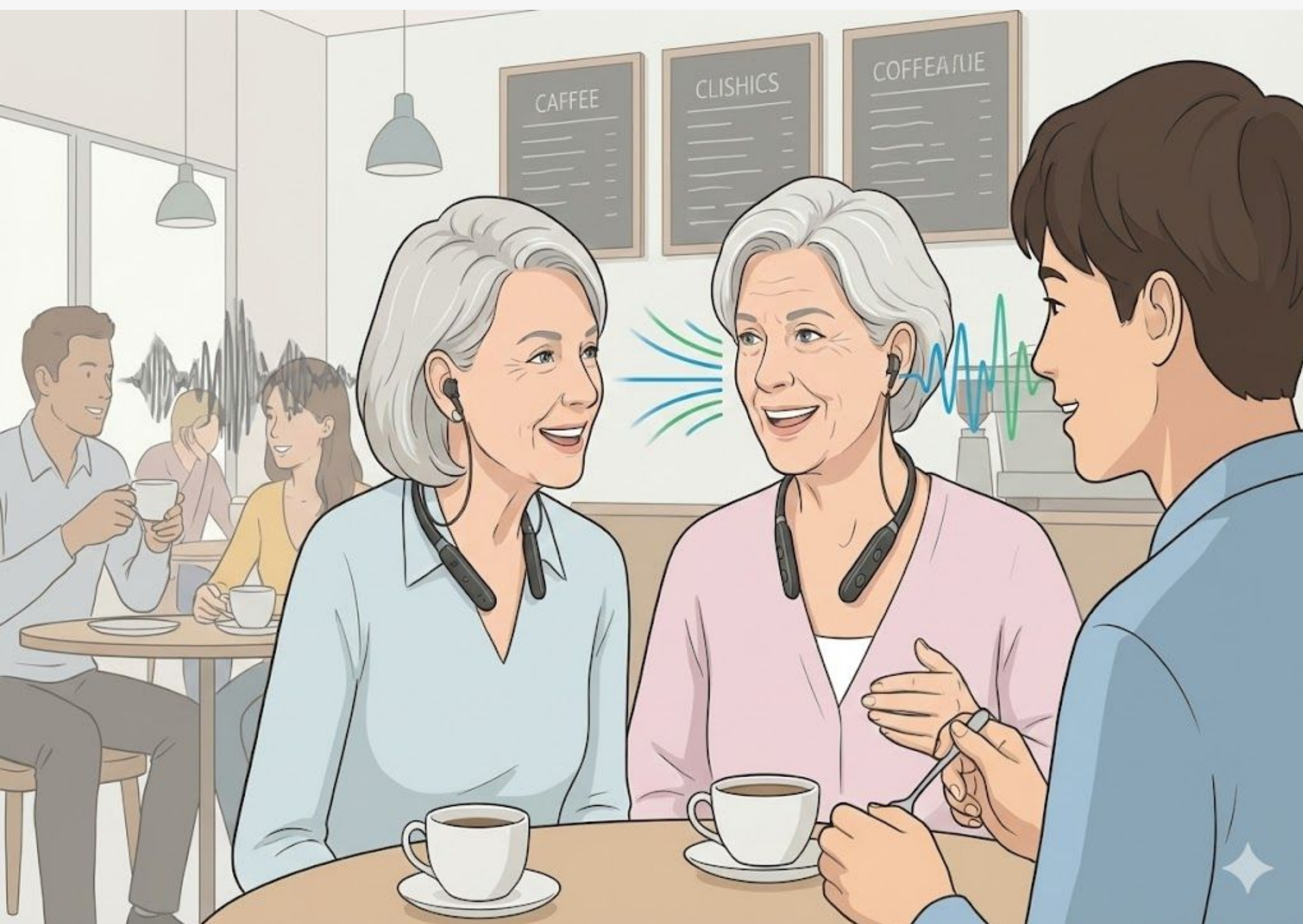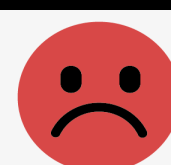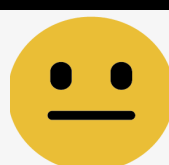[Suivant](#)

2.2 Ajuster les paramètres

- **Modes d'écoute (3)**

Appuyez sur le bouton mode pour faire défiler les modes :



- 1 bip – Normal
- 2 bips – Réduction du bruit 1
- 3 bips – Réduction du bruit 2

- **Ajuster l'amélioration**

Appuyez sur **+** / **-** pour régler le volume.



Suivant

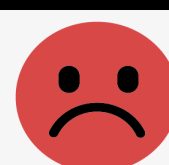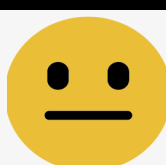

3. Boutons & Indicateurs



① MFB

Maintenir 2s : Allumer/Éteindre



② Bouton Mode

Appuyer pour faire défiler :

- Normal
- Réduction du bruit 1
- Réduction du bruit 2

 [Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant

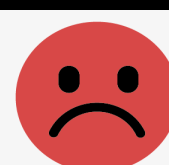
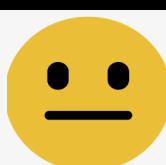


4. Puissance & Charge

- Utiliser un câble USB-C (5V, 0,5A~2A)
- Charge complète : ~ 2,5 heures
- Autonomie : Jusqu'à 50 heures





Suivant

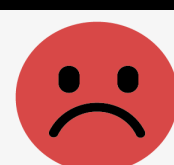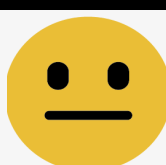

Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.

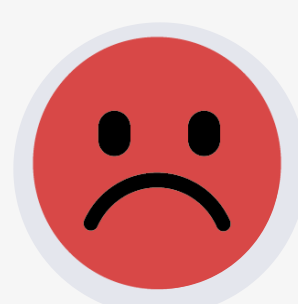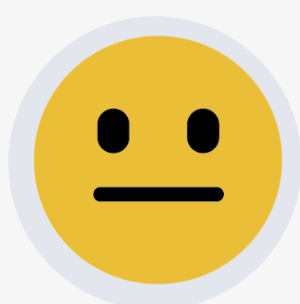[Suivant](#)



5. Dépannage

Problèmes courants



- Les sons environnants sont trop forts
- Sifflement

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?
[Contactez le support ↗](#)

Suivant

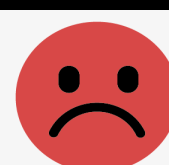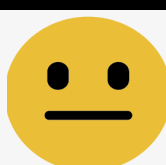

< Retour



Menu

6. Support & Retour d'information

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.



Email



Appeler



Chat

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

Obtenez la garantie de 24M

