



AcuEar C1

Auricolari Assistivi
Con Riduzione del Rumore




Guida Utente Interattiva

Versione 2.3.1



Configurazione iniziale

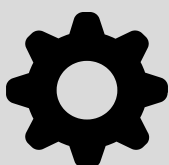

Risoluzione dei problemi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di iniziare
2. Inizia a usare le cuffie
3. Pulsanti e indicatori
4. Alimentazione e ricarica
5. Risoluzione dei problemi
6. Supporto e feedback



Avanti

1. Prima di iniziare

Assistenti di ascolto semplici **earbud** — non Bluetooth, non apparecchio acustico.

- Nessun Bluetooth necessario
- Non è un apparecchio acustico medico
- Adatto per perdita uditiva lieve o moderata
- **Facile aumento della voce** per uso quotidiano
- **Modalità di riduzione del rumore** per ambienti rumorosi
- Fino a **50** ore di utilizzo


Avanti

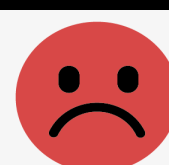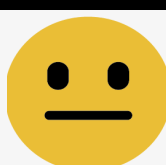



2. Inizia a usare gli auricolari

2.1 Uso di base

Nessuna configurazione necessaria, indossalo e accendilo (premi e tieni premuto MFB per 2s).

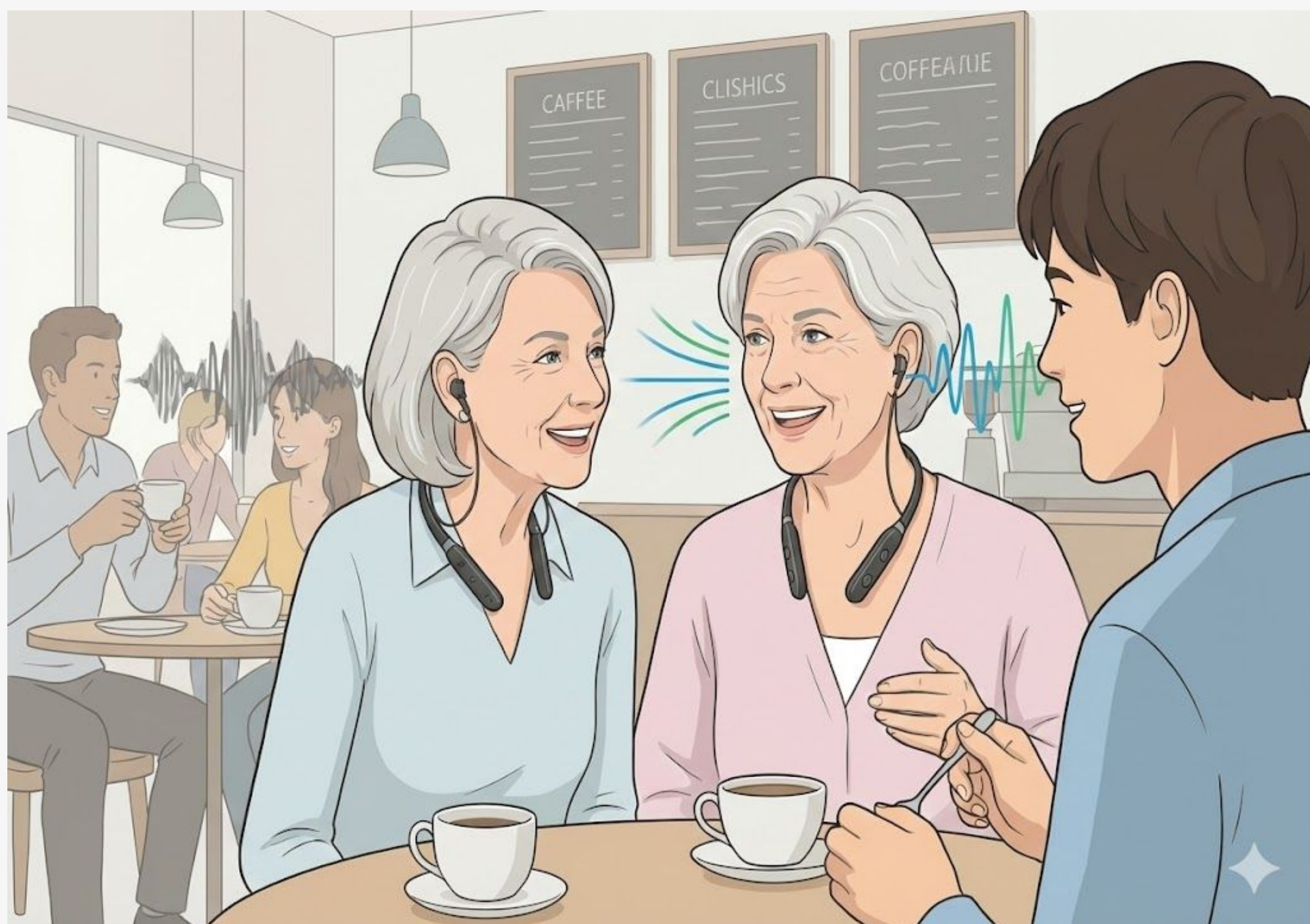

Avanti

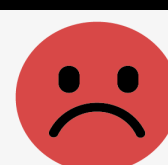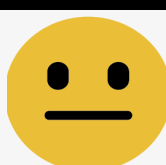

2.2 Regola le impostazioni


- **Modalità di ascolto (3)**

Premi il pulsante modalità per cambiare modalità:



- 1 beep – Normale
- 2 beeps – Riduzione del rumore 1
- 3 beeps – Riduzione del rumore 2

- **Regola l'amplificazione**

Premi **+** / **-** per regolare il volume.

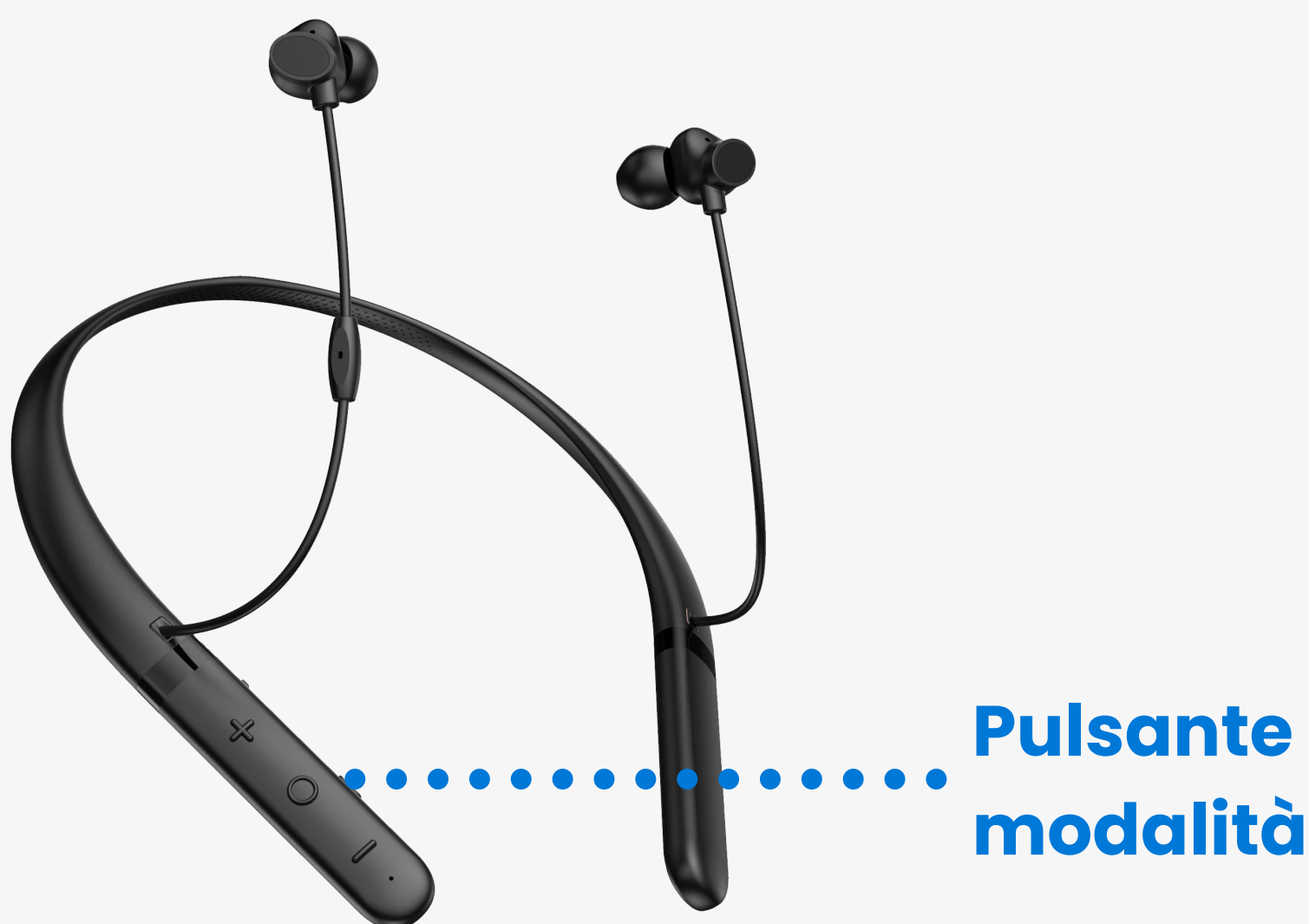

Avanti

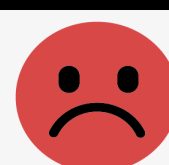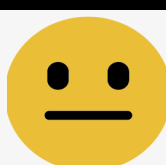

3. Pulsanti & Indicatori



① MFB

Tieni premuto 2s: Accendi/Spegni



② Pulsante Modalità

Premi per scorrere tra:

- Normale
- Riduzione Rumore 1
- Riduzione Rumore 2

 [Guida completa a pulsanti e indicatori](#)

Avanti

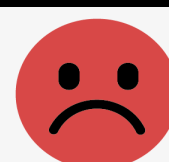
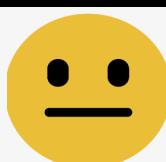


4. Alimentazione & Ricarica

- Usa un cavo USB-C (5V, 0,5A~2A)
- Carica completa: ~ 2,5 ore
- Tempo di riproduzione: fino a 50 ore



Avanti

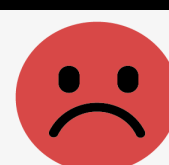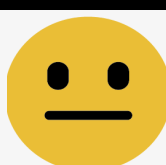

< Indietro




Menu

Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.

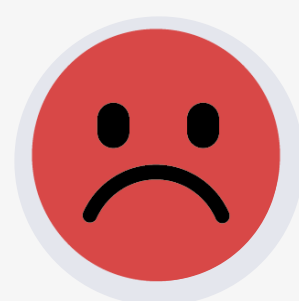

Avanti



5. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

- Suoni ambientali troppo forti
- Sospirare



 [Ulteriori FAQ & Aiuto ↗](#)



Hai ancora bisogno di aiuto?

[Contatta il supporto ↗](#)

Avanti

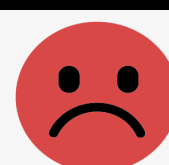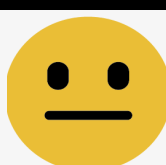



6. Supporto e Feedback

Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia e ricevi aggiornamenti.

Ottieni garanzia di 24 mesi

