



# Audikast 4HA

Transmisor de TV Auracast  
para audífonos




## Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial

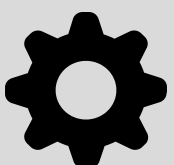

Solución de problemas

[< Atrás](#)



# Menú Principal

1. Antes de comenzar
2. Obtener sonido de la televisión
3. Configurar audio de la televisión a PCM
4. Usar con audífonos
5. Usar con auriculares Bluetooth
6. Configuración avanzada
  - Renombrar transmisión
  - Cambiar código de acceso
7. Solución de problemas
8. Soporte y comentarios

## Referencia rápida

- Botones y indicadores

[Siguiente](#)



# 1. Antes de empezar

Mejor ajustado para **Audífonos Auracast**

- [Verificar compatibilidad](#) ↗

## Otros audífonos

Audífonos con bucle (T-coil)

- Usar receptor + bucle de cuello (por ejemplo, [AuraClip](#))

Audífonos heredados

- Usar receptor (auriculares de 3.5mm)
- O usar auriculares Auracast

## Auriculares Bluetooth (Opcional)

- Sin doble enlace


Siguiente

[Califica esta guía](#) →

## 2. Obtener sonido de la televisión

- 1 Enciende el transmisor.
- 2 Conecta a **TV mediante un cable de audio.**

- **OPT (Recomendado)**  
Mejor sonido y más estable
- **AUX (3.5mm)**  
Si no hay puerto óptico
- **¿Televisor solo HDMI?**  
Usa [HAX06](#) adaptador  
HDMI→Óptico

 *¿No estás seguro? [Envíanos](#) una foto de los puertos de tu televisor.*

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

## 3. Configurar audio de la TV a PCM

Para usuarios de conexión **Óptica**

**1** Salida de audio

 **Óptico**

**2** Salida de audio digital

 **PCM (Requerido)**

Si se configura en **PCM**, ya estás listo.



*¿No estás seguro de cómo **configurar PCM?***

Consulta la [guía de TV por marca](#) ↗

Siguiente

[Califica esta Guía](#) →



# Elige tu dispositivo de escucha

Elige una opción a continuación

**A**



## Audífonos para sordera

→ Transmitir a múltiples **audífonos habilitados para Auracast para sordera**

**B**



## Auriculares Bluetooth



→ Conectar a **uno auricular** solo

## 4. Uso con audífonos


Funciona con audífonos **compatibles con Auracast**. Ver [Verificador de compatibilidad](#) ↗

**1** Desliza el interruptor de encendido a ON. → Entra en modo auto-auracast .

 El LED  se vuelve **blanco sólido**.

- *Si el LED  no está encendido, presiona  una vez.*

**2** Busca y únete a la transmisión en la app de tu audífono.

-  *¿Necesitas ayuda?  
Consulta la guía de la marca en [la siguiente página](#).*

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

< Atrás



Menú

## Únete a Auracast con tu aplicación de audífonos



Abrirás una nueva guía.  
Vuelve aquí cuando termines.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon  
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS

Siguiente


Califica esta guía →

## Unirse con Asistente Auracast

- Disponible en teléfonos Android más nuevos. [Ver teléfonos compatibles](#) ↗
- **Modelo compatible de Widex:**  
**Allure (firmware  $\geq$  5.1.20)**

### *Ejemplo: Samsung Galaxy S24*

- 1 Conecta audífonos con el teléfono.
- 2 Abre la configuración de Bluetooth del teléfono.
- 3 Toca Escuchar transmisión Auracast.
- 4 Selecciona una transmisión.

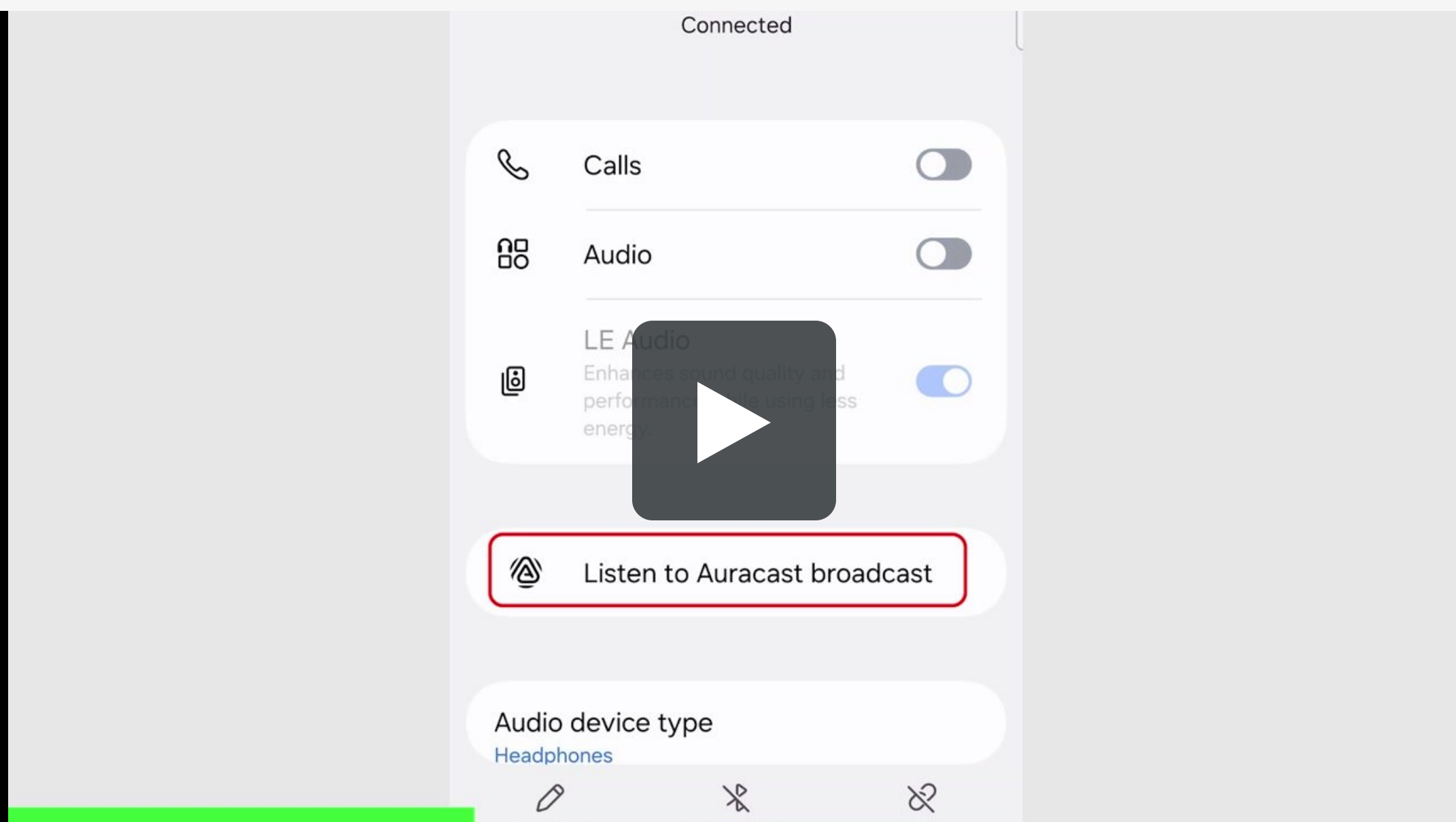


Siguiente

Califica esta guía →

## 5. Uso con auriculares Bluetooth

❶ Desliza el interruptor de encendido a ACTIVADO.

❷ Presiona  para cambiar a modo Bluetooth. → La luz LED parpadea **roja** & **azul**.

👉 Si no, mantén .

❸ Asegúrate de que los auriculares estén en modo de emparejamiento.

👉 ¿No estás seguro? [Guía de emparejamiento de auriculares](#) ↗

✅ Conectado: LED  se enciende **fijo**.



Siguiente

Califica esta guía →


# 6. Configuración avanzada

## 6.1 Renombrar transmisión

Cambie el nombre de su transmisión Auracast para facilitar su identificación.

### Pasos:

- 1 Abra la [página de actualización del firmware](#)
- 2 Descargue e instale Avantree Firmware Updater
- 3 Vaya a Configuración → Nombre de transmisión y ingrese un nuevo nombre

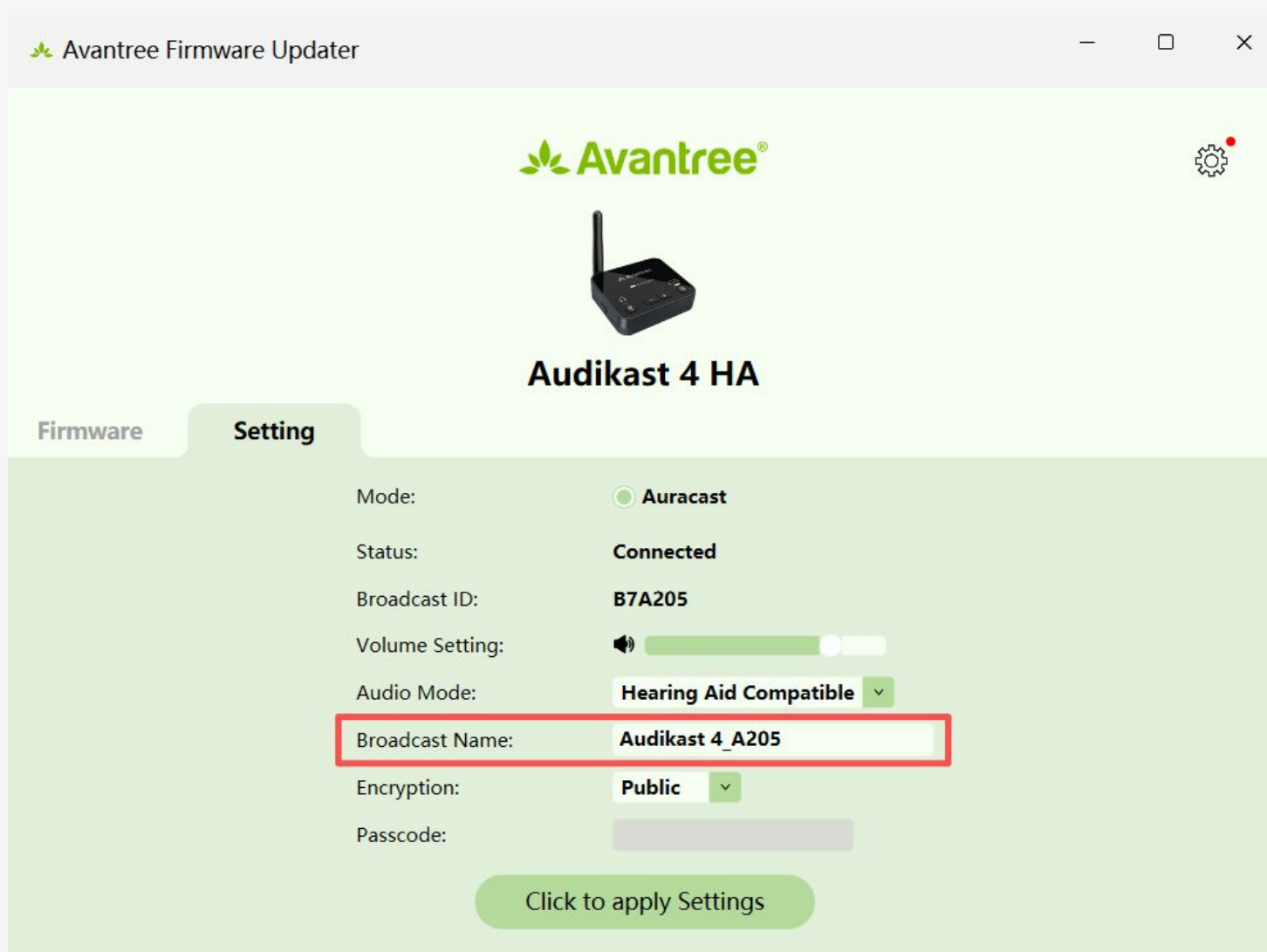


Siguiente

## Cambiar código de acceso

Configura o actualiza tu código de acceso para controlar el acceso y mejorar la privacidad.

### Pasos:

Ve a Configuración → Encriptación y escribe una contraseña

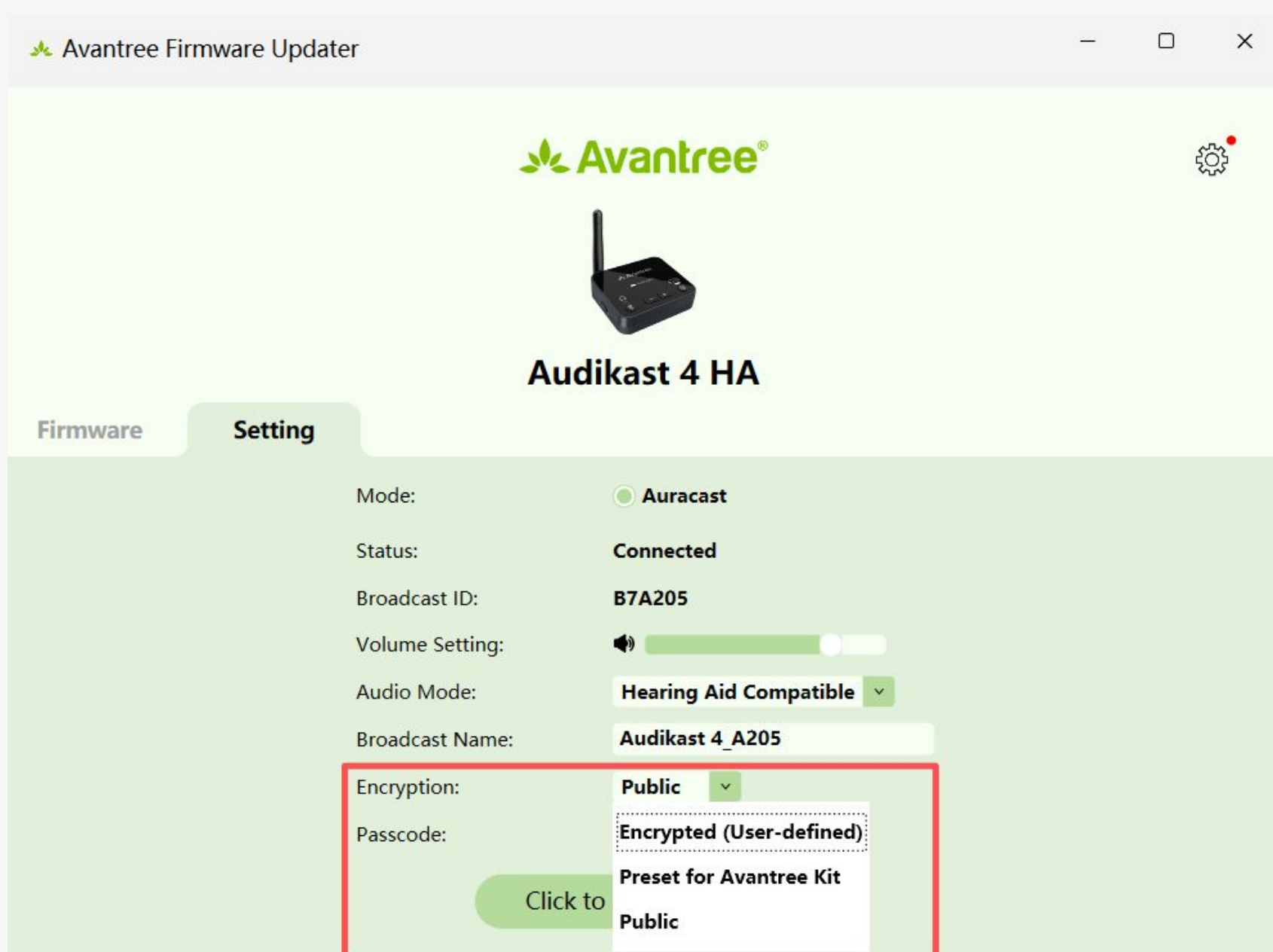

Siguiente



# 7. Resolución de problemas

## Problemas comunes

---

- [No puedo conectar con los audífonos ↗](#)
- [Configurar PCM para evitar sin sonido ↗](#)
- [Verificación rápida de compatibilidad ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



*¿Aún necesitas ayuda?*

[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



## 8. Soporte y Retroalimentación

### Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo electrónico



Llamar



Chat

### Registrar su producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtén 24M de garantía](#)

# Botones e Indicadores



## A Señal de audio

✓ Sólido → OK

⚠ Parpadeando → Problema de audio

## B Bluetooth

✓ Sólido → Conectado

⚠ Parpadeando → No conectado

## C Auracast

✓ **Blanco sólido** → Transmisión para audífonos y altavoces

✓ **Sólido naranja** → Transmisión para auriculares/altavoces Auracast

[👉 Guía completa de botones e indicadores](#)

[Califica esta guía →](#)