



# Audikast 4HA

Transmetteur TV Auracast  
pour aides auditives




## Guide utilisateur interactif

Version 2.3



Première configuration

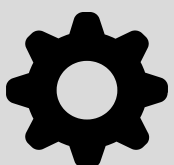

Dépannage

< Retour



# Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la télévision
3. Régler le son de la télévision sur PCM
4. Utiliser avec des aides auditives
5. Utiliser avec des écouteurs Bluetooth
6. Configuration avancée
  - Renommer la diffusion
  - Changer le code d'accès
7. Dépannage
8. Support & Retour d'information

## Référence rapide

- Boutons & Indicateurs

Suivant

# 1. Avant de commencer

Optimisé pour **Aides auditives Auracast**

- [Vérifier la compatibilité](#) ↗

## Autres aides auditives

Aides auditives avec boucle (T-coil)

- Utilisez le récepteur + boucle de cou (par ex. [AuraClip](#))

Aides auditives classiques

- Utilisez le récepteur (écouteurs 3,5 mm)
- Ou utilisez des écouteurs Auracast

## Écouteurs Bluetooth (optionnel)

- Pas de double connexion

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

## 2. Obtenir le son de la télévision

- 1 Allumez le transmetteur.
- 2 Connectez-vous à **la télévision via un câble audio.**

- **OPT (Recommandé)**

Meilleur son & plus stable

- **AUX (3,5 mm)**

Si pas de port optique

- **TV uniquement HDMI ?**

Utilisez [HAX06](#) adaptateur  
HDMI→Optique



*Pas sûr ? [Envoyez-nous](#) une photo de vos ports TV.*

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



## 3. Réglez le son de la TV sur PCM

Pour les utilisateurs de **Optique**

1 Sortie audio

 **Optique**

2 Sortie audio numérique

 **PCM (obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.



*Pas sûr de comment **régler PCM** ?  
Vérifiez le [guide TV par marque](#) ↗*

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →



# Choisissez votre appareil d'écoute

Choisissez une option ci-dessous

**A**



## Aides auditives

→ Diffusion vers plusieurs  
**aides auditives compatibles Auracast**  
hearing aids

**B**



## Écouteurs Bluetooth

→ Se connecter à **un écouteur**  
uniquement

**Évaluez ce guide →**

## 4. Utilisation avec des aides auditives


Compatible avec les aides auditives **compatibles avec Auracast**. Voir [Vérificateur de compatibilité](#) ↗

**1** Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position ON. → Entrez en mode *Auracast*.

 LED  devient **blanche fixe**.

- *Si la LED  n'est pas allumée, appuyez  une fois.*

**2** Trouver et rejoindre la diffusion dans votre application d'aide auditive.

 *Besoin d'aide ?  
Voir le guide de la marque à la [page suivante](#).*

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

< Retour



Menu

Rejoignez Auracast avec votre application d'aide auditive



Vous allez ouvrir un nouveau guide.  
Revenez ici une fois terminé.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon  
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS

Suivant


Évaluez ce guide →

## Rejoindre avec l'assistant Auracast

- Disponible sur les téléphones Android plus récents. [Vérifier les téléphones compatibles](#) ↗
- **Modèle supporté par Widex :**  
**Allure (firmware  $\geq$  5.1.20)**

### *Exemple : Samsung Galaxy S24*

- ➊ Connectez les aides auditives au téléphone.
- ➋ Ouvrir les paramètres Bluetooth du téléphone.
- ➌ Tapez **Écouter la diffusion Auracast**
- ➍ Sélectionnez une diffusion.

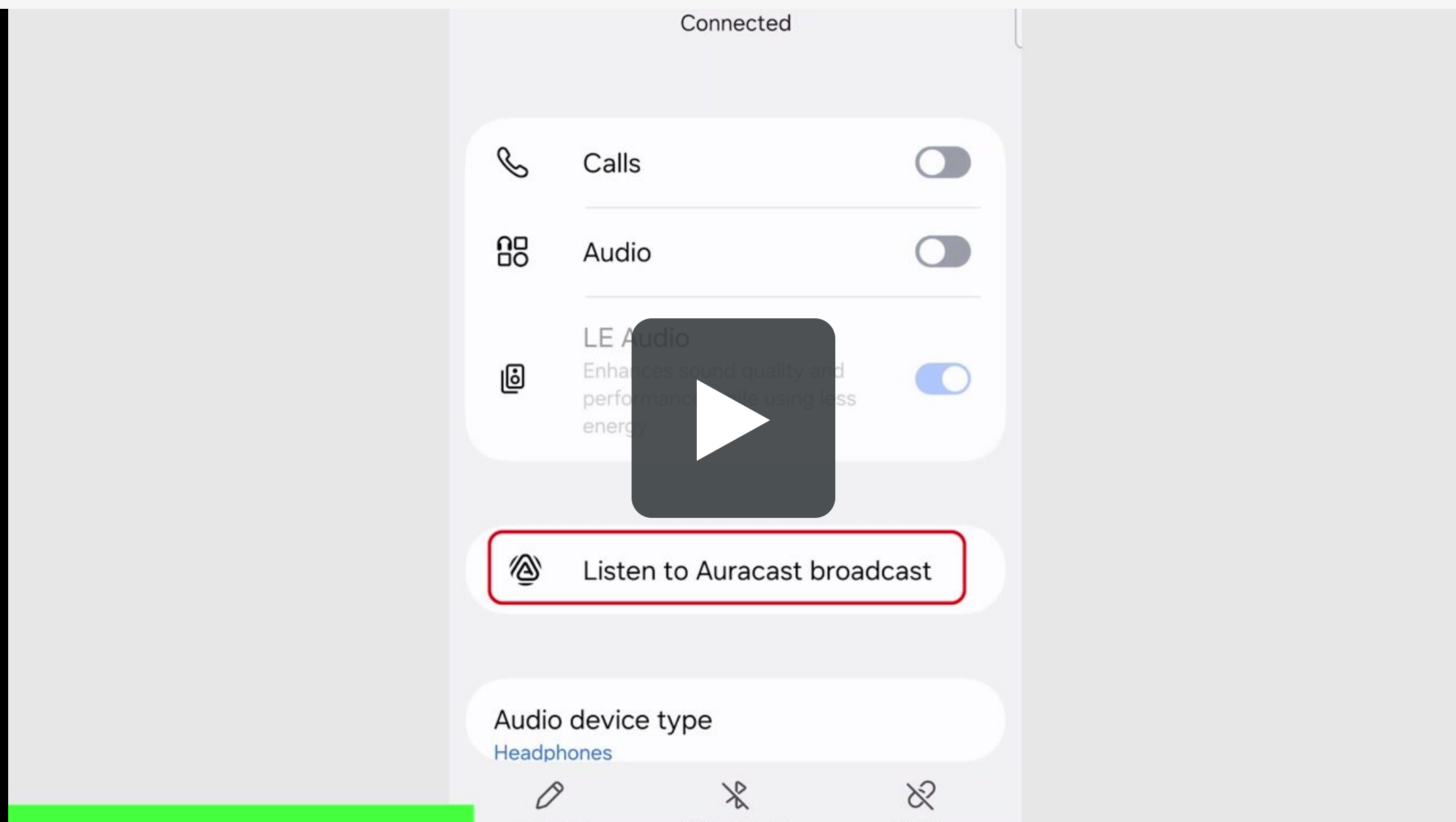


Suivant

Évaluez ce guide →

## 5. Utiliser avec des écouteurs Bluetooth

❶ Faire glisser l'interrupteur d'alimentation en position ON.

❷ Appuyez  pour passer en mode Bluetooth. → LED clignote **rouge** & **bleu**.

👉 Si ce n'est pas le cas, maintenez .

❸ Assurez-vous que les écouteurs sont en mode appairage.

👉 Pas sûr ? [Guide d'appairage des écouteurs](#) ↗

✅ Connecté : LED  clignote **fixement**.



Suivant

Évaluez ce guide →


# 6. Configuration avancée

## 6. Renommer la diffusion

Changez le nom de votre diffusion Auracast pour une identification plus facile.

### Étapes :

- 1 Ouvrez la [page de mise à jour du firmware](#)
- 2 Téléchargez et installez le mise à jour du firmware Avantree
- 3 Allez dans Paramètres → Nom de diffusion et entrez un nouveau nom

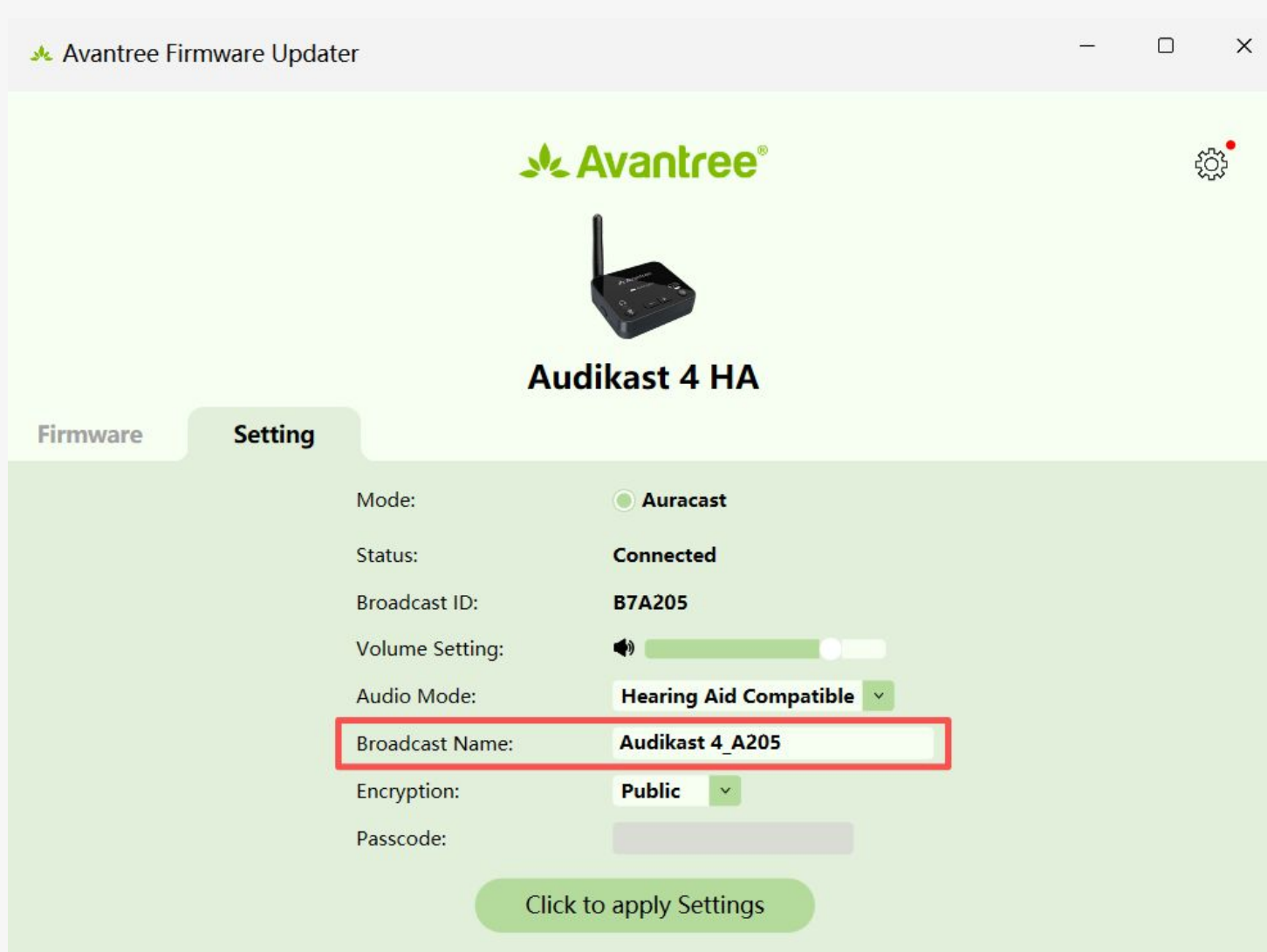

Suivant


Évaluez ce guide →

## Changer le code d'accès

Définissez ou mettez à jour votre code d'accès à la diffusion pour contrôler l'accès et améliorer la confidentialité.

### Étapes :

Accédez à Paramètres → Chiffrement et entrez un mot de passe

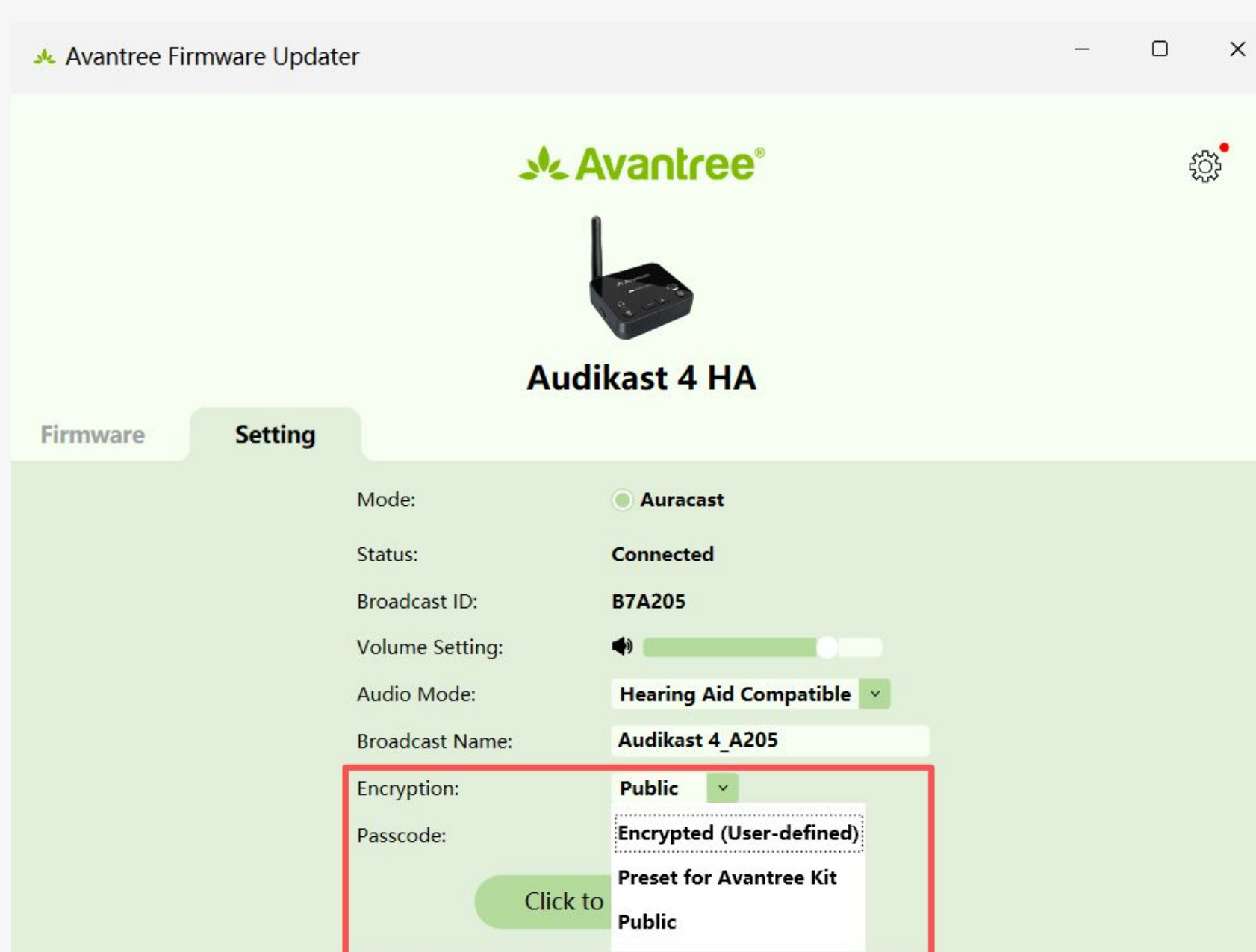

Suivant

Évaluez ce guide →



# 7. Dépannage

## Problèmes courants

---

- Impossible de se connecter aux aides auditives ↗
- Réglez le PCM pour éviter l'absence de son ↗
- Vérification rapide de compatibilité ↗

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



*Vous avez encore besoin d'aide ?*  
[Contacter le support ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



## 8. Support & Retour d'information

### Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

### Enregistrer votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Obtenir la garantie de 24M](#)

# Boutons & Indicateurs



## **A** Signal audio

✓ Solide → OK

⚠ Clignotement → Problème audio

## **B** Bluetooth

✓ Solide → Connecté

⚠ Clignotement → Non connecté

## **C** Auracast

✓ **Blanc solide** → Diffusion pour aides auditives

✓ **Orange solide** → Diffusion pour casques/enceintes Auracast

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

[Évaluez ce guide →](#)