

C82 Aura Transmitter for Hearing Aids



Interactivo Guía de configuración

Versión 1.5

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Botones & Indicadores](#)
3. [Audífonos Compatibles](#)
4. [Usar con la App](#)
5. [Usar con Teléfono Samsung](#)
6. [Funciones Avanzadas](#)
7. [Registrar tu Producto](#)
8. [Asistencia en Vivo](#)
9. [Califica esta Guía](#)


[Siguiente](#)




1. Antes de Comenzar

- Dongle exclusivo para Auracast (no para Bluetooth estándar)
- Envía audio a dispositivos Auracast
- Compatible con audífonos
→ [[Ver Dispositivos Compatibles](#)]
- Modo predeterminado: Audífono

Siguiente

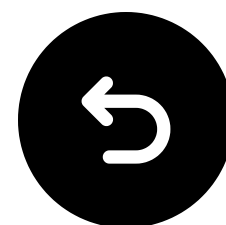

2. Botones & Indicadores

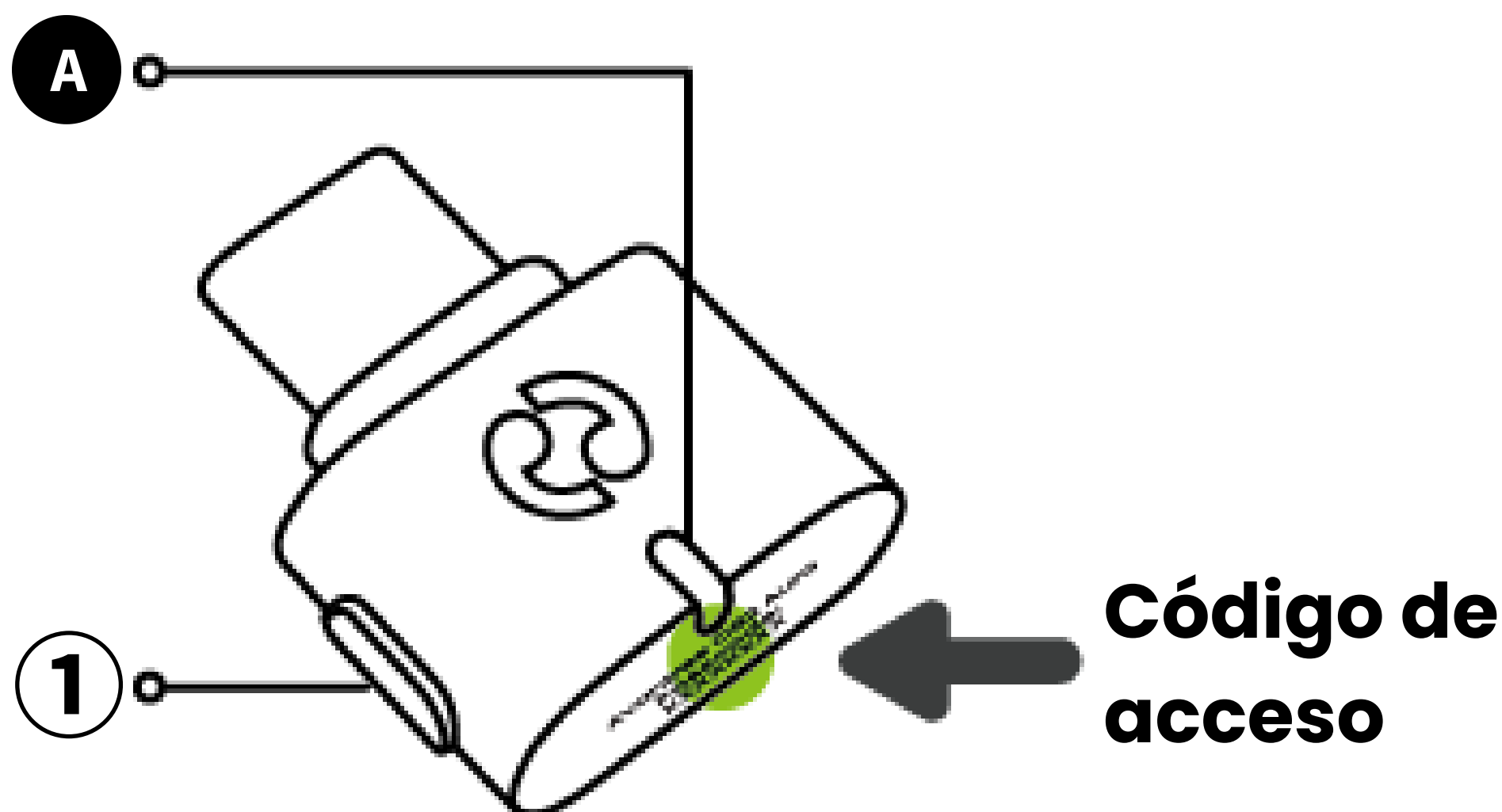

- Mantén presionado ① MFB durante 6s para cambiar de modo: → LED ● A :
 - **Blanco** = Audífono
 - **Naranja** = HD
- LED sólido = Transmisión

Siguiente



3. Dispositivi compatibili


A. Auracast-Enabled

Conectar mediante y nuestra aplicación complementaria para audífonos

o [un Asistente Auracast \(por ejemplo Samsung S24\)](#).

- ReSound Nexia,
- ReSound Vivid
- ReSound Savi
- Beltone Commence
- Beltone Envision
- Beltone Serene
- GN Danalogic Extend
- Jabra Enhance Pro 20
- Jabra Enhance Pro 30
- ...

Siguiente

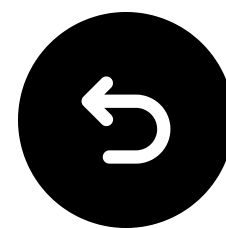

3. Dispositivi compatibili

B. Listo para Auracast

Requiere [un Asistente de Auracast \(p.ej. Samsung S24\)](#) para conectar

- Phonak Infinio Sphere 90
- Starkey Edge AI
- Oticon Intent
- Signia Pure Charge
- Signia Go IX
- Rexton Reach
- ...

Nota:

El soporte del dispositivo se actualiza regularmente.

Consulta [Preguntas Frecuentes](#) para la lista más actualizada.

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú




4. Usar con la App

1☒ Conecta C82 Aura y reproduce audio.

2☒ En la app de tu audífono: go a **LE Audio/Auracast**.

3☒ Toca **Aura_XXXX**, luego ingresa la contraseña. → Ya estás listo.

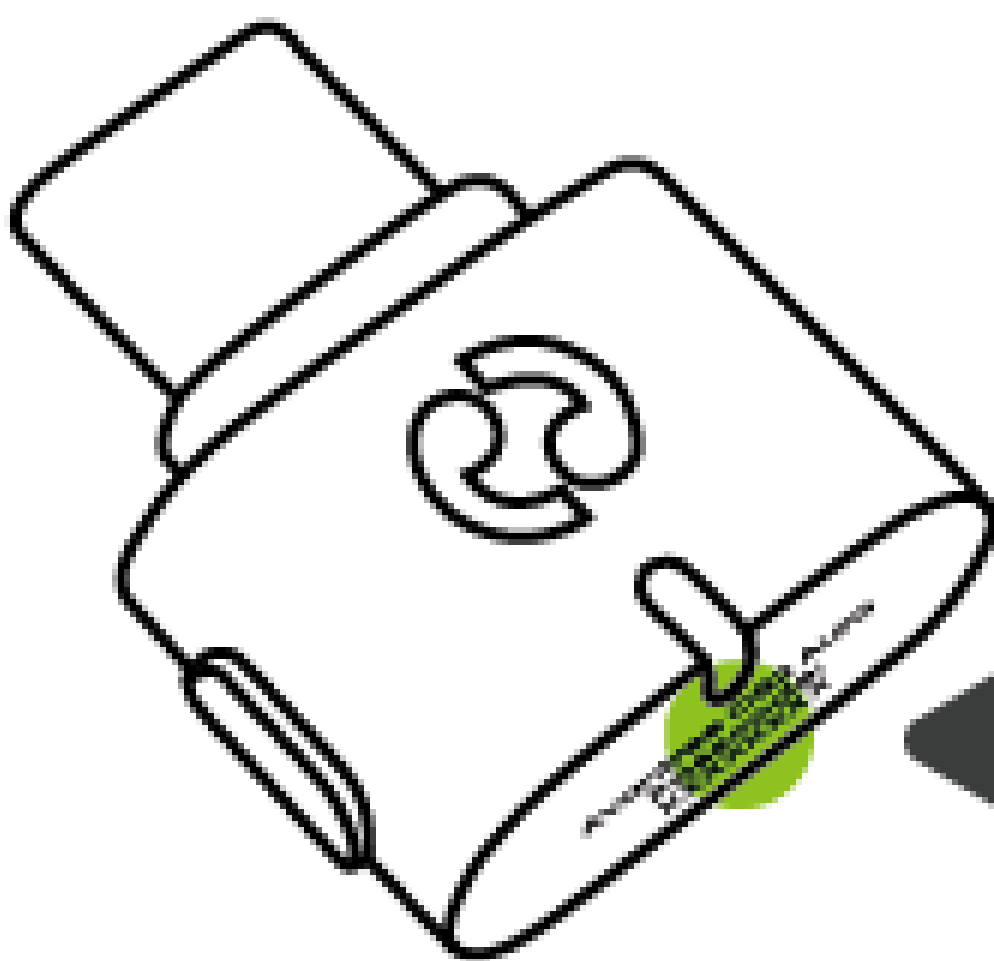

**Código de
acceso**

Siguiente



5. Uso con Teléfono Samsung


1☒ Conecta C82 Aura y reproduce audio.

2☒ Enciende Bluetooth y choje tus audífonos.

3☒ Toca  y activa **Audio LE**.

4☒ Toca **Escuchar transmisión Auracast > Aura_XXXX**.

5☒ Ingresa la contraseña. → Estás Listo.

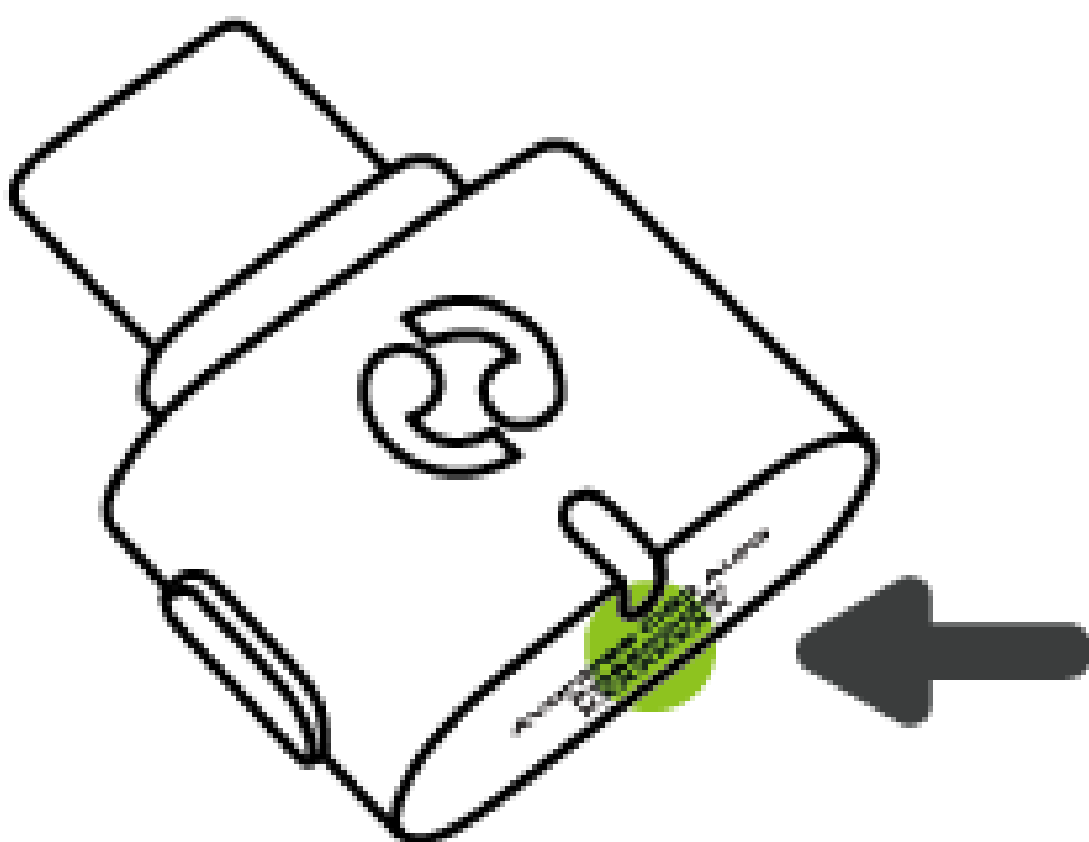

**Código de
acceso**

Busca Alternativas de Teléfonos Samsung ↗

Siguiente



6. Funciones Avanzadas

6.1 Actualización de Firmware

1☒ Descargar [Actualizador Avantree](#) en tu PC.

2☒ Conecta C82 Aura.

3☒ Instala y ejecuta la aplicación.

4☒ Sigue los pasos en la aplicación.

Siguiente



6. Funciones Avanzadas

6.2 Configuración del Modo HD

C82 Aura soporta sonido en HD con auriculares Auracast como [Avantree Infinity](#).

[Contáctanos](#) para saber cómo configurarlo.

[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al
Menú



7. Registra tu Producto

Regístrate ahora para:


- Recibir notificaciones de [actualizaciones de firmware](#).
- Ampliar la garantía a 24 meses—
GRATIS.
- Disfruta de soporte prioritario.

[Regístrate Ahora ↗](#)

Estás Listo

< Atrás

Volver al
Menú

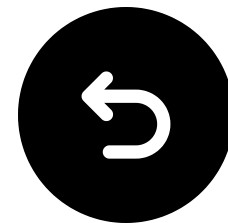

8. Ayuda en vivo con un agente

Responderemos en **1 día hábil**

Opciones rápidas de soporte:

☒ Correo electrónico:

support@avantree.com


☒ Programar llamada de vuelta ↗

☒ Enviar un ticket ↗

☒ Chat en vivo ↗

< Atrás

Volver al
Menú

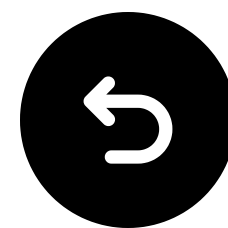

9. Califica esta Guía

¡Gracias por elegir C82 Aura!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida valoración nos ayuda a mejorar:

