

# **C82 Aura Transmitter for Hearing Aids**



## **Interactif Guide de configuration**

**Version 1.5**


**Démarrer la configuration**

[< Retour](#)

# Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Boutons & Indicateurs](#)
3. [Appareils auditifs compatibles](#)
4. [Utiliser avec l'application](#)
5. [Utiliser avec un téléphone Samsung](#)
6. [Fonctionnalités avancées](#)
7. [Enregistrer votre produit](#)
8. [Assistance en direct](#)
9. [Évaluer ce guide](#)

[Suivant](#)

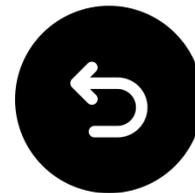


# 1. Avant de commencer

- Clé uniquement pour Auracast  
(pas pour Bluetooth standard)
- Envoie le son aux appareils  
Auracast
- Prend en charge les aides  
auditives  
→ [[Voir les appareils  
compatibles](#)]
- Mode par défaut : Aide auditive



## 2. Boutons & Indicateurs

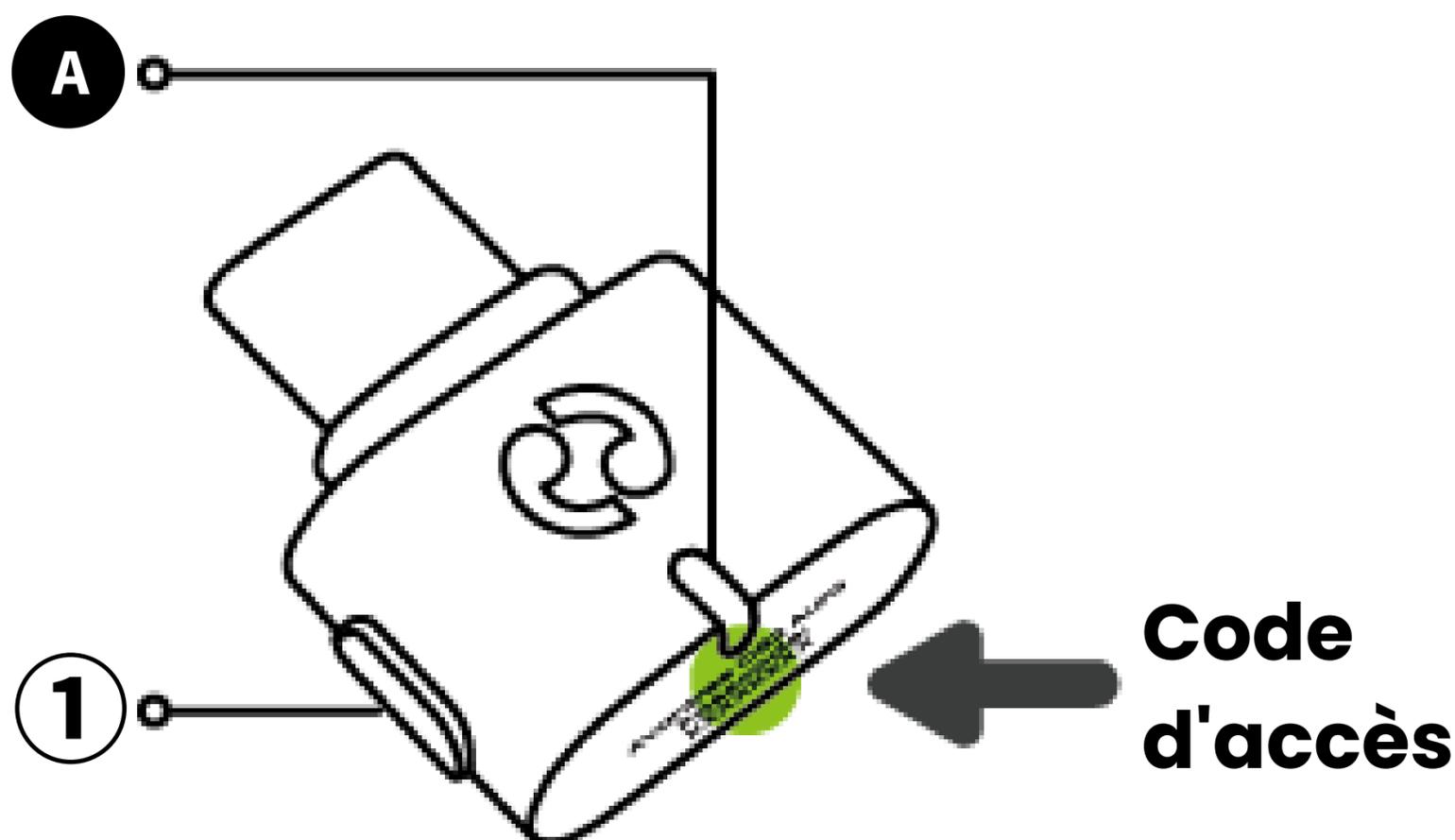

- Appuyez et maintenez ① MFB pendant 6s pour changer de mode : → LED ● A :
  - **Blanc** = Appareil auditif
  - **Orange** = HD
- LED fixe = Diffusion



## 3. Appareils compatibles

### A. Auracast-Activé

Connectez-vous via votre application compagnon pour appareils auditifs ou [un assistant Auracast \(par ex. Samsung S24\)](#).

- ReSound Nexia,
- ReSound Vivid
- ReSound Savi
- Beltone Commence
- Beltone Envision
- Beltone Serene
- GN Danalogic Extend
- Jabra Enhance Pro 20
- Jabra Enhance Pro 30
- ...



## 3. Appareils compatibles

### B. Prêt pour Auracast

Nécessite [un assistant Auracast \(par ex. Samsung S24\)](#) pour connecter


- Phonak Infinio Sphere 90
- Starkey Edge AI
- Oticon Intent
- Signia Pure Charge
- Signia Go IX
- Rexton Reach
- ...

#### **Note :**

Le support des appareils est mis à jour régulièrement.

Vérifiez [FAQ](#) pour la dernière liste.

Suivant

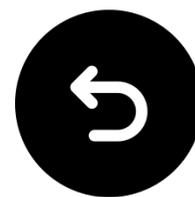


## 4. Utiliser avec l'application


1☒ Branchez le C82 Aura et lancez l'audio.

2☒ Sur l'application de votre aide auditive : go à **LE Audio/Auracast**.

3☒ Appuyez sur **Aura\_XXXX**, puis saisissez le mot de passe.  
→ Vous êtes prêt.

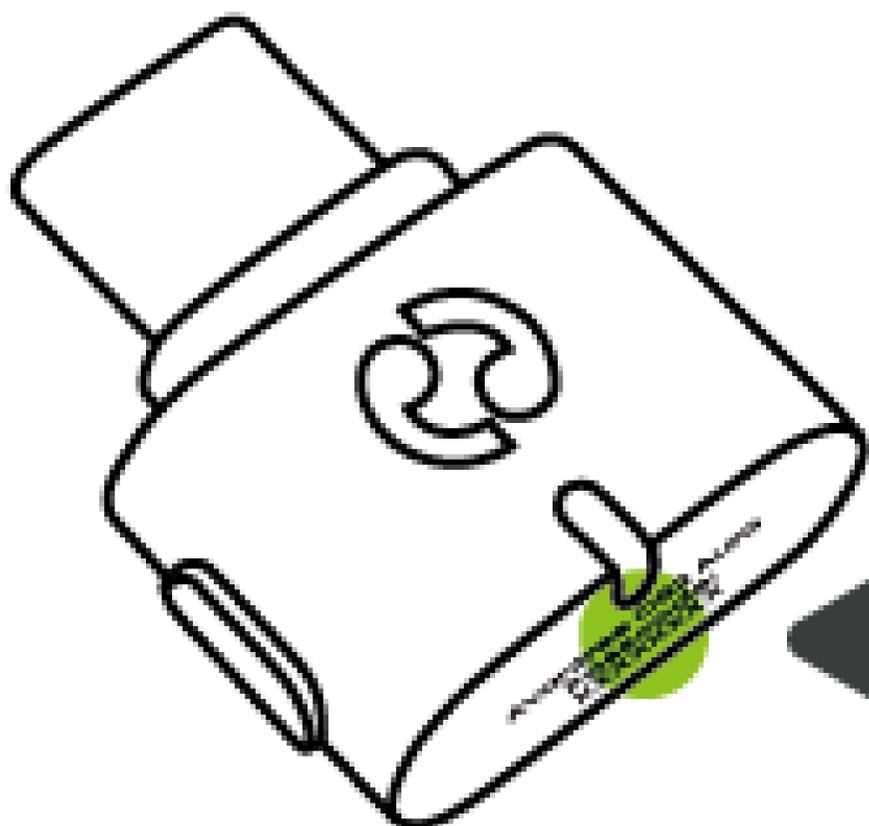

**Code  
d'accès**

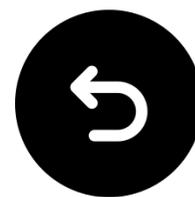

## 5. Utiliser avec un téléphone Samsung

1☒ Brancher le C82 Aura et lire l'audio.


2☒ Activer le Bluetooth et choisir  
vos appareils auditifs.

3☒ Appuyer sur  et activer **LE Audio**.

4☒ Appuyer sur **Écouter la diffusion  
Auracast > Aura\_XXXX**.

5☒ Entrer le mot de passe.


→ Vous êtes prêt.

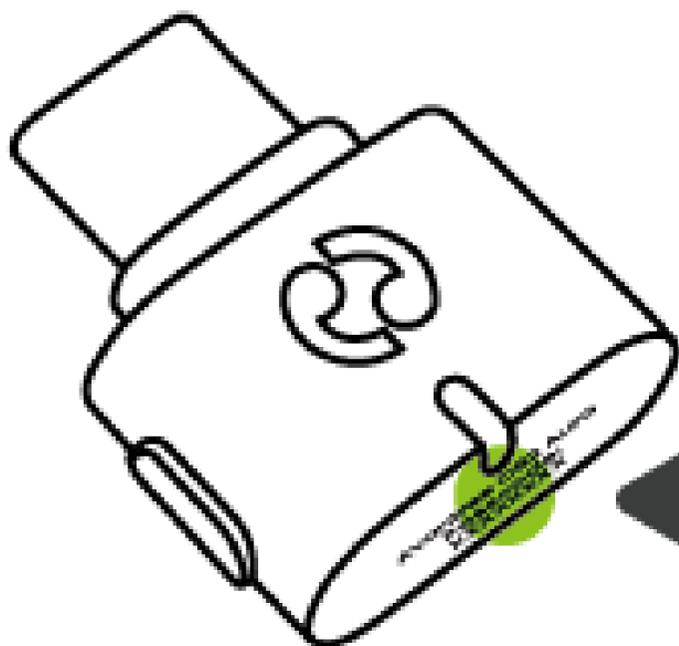

**Code d'accès**

[Trouver des alternatives au  
téléphone Samsung ↗](#)

Suivant

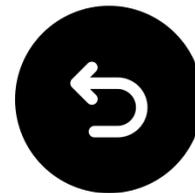


# 6. Fonctionnalités avancées

## 6.1 Mise à jour du firmware

- 1☒ Télécharger [Mise à jour Avantree](#) sur votre PC.
- 2☒ Brancher le C82 Aura.
- 3☒ Installer et lancer l'application.
- 4☒ Suivez les étapes dans l'application.

< Retour

Retour au  
menu

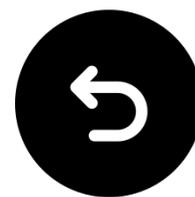

# 6. Fonctionnalités avancées

## 6.2 Configuration du mode HD


C82 Aura prend en charge le son HD avec des écouteurs Auracast comme [Avantree Infinity](#).

[Contactez-nous](#) pour savoir comment configurer.

Suivant

< Retour

Retour au  
menu

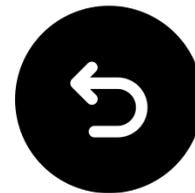

## 7. Enregistrez votre produit

Inscrivez-vous maintenant pour :


- Recevoir des notifications de [mises à jour du firmware](#).
- Prolonger la garantie à 24 mois — GRATUIT.
- Bénéficier d'un support prioritaire.

[Inscrivez-vous maintenant ↗](#)

**Vous êtes prêt**

< Retour

Retour au  
menu

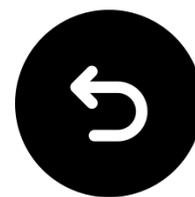

## 8. Assistance en direct avec un agent

Nous répondrons dans **1 jour  
ouvrable**

Options de support rapide :

Email : [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)


Programmer un rappel ↗

Soumettre un ticket ↗

Chat en direct ↗

< Retour

Retour au  
menu

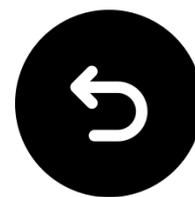

## 9. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi C82 Aura !

Nous espérons que ce guide vous a aidé à commencer.

Votre évaluation rapide nous aide à nous améliorer :

